


Snabbstart guide Posifon Active

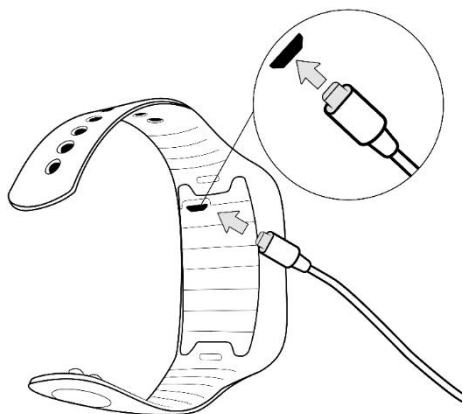

1. Ladda din Posifon Active

Koppla in laddarens kabel i USB-kontakten på Active-enheten och i strömadaptern. Stoppa sedan adaptern i lämpligt eluttag.


Det tar ungefär två timmar att ladda Active. Batteriet är fulladdat när enhetens display slutar blinka och visar ett batteri som har alla staplar fyllda. Bilden till höger visar ett batteri som är till 80% laddat.



2. Daglig användning

Tryck på enhets display för att se vad klockan är, se bild till höger. Trycker du två gånger så ser du enhetens nuvarande batteristatus. För att larma, tryck och håll ner enhetens display i 4 sekunder. En nedräkning från 20 till 0 inleds. När nedräkningen når 0 så kommer enheten ta en position och skicka larmmeddelandet.

För att avfärda larmet under nedräkningen, tryck en gång på enhetens display. Om du vill avbryta ett pågående larm senare så får du trycka 7 gånger på enhetens display.

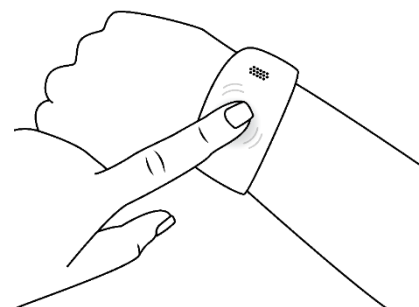

3. Logga in via webbläsare eller i appen på din SmartPhone.



I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter till systemet www.posifoncare.se och appen PosifonCare. Appen finns både till Android och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store för att hitta den. Via appen kan du söka var brukaren befinner sig och hantera larm. Via webbgränssnittet kan du utöver detta också göra de inställningar som önskas. Detta kan göras från olika datorer så länge rätt inloggningsuppgifter används.